

**COMMISSION NATIONALE D'ÉVALUATION
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DES TECHNOLOGIES DE SANTÉ**

AVIS DE LA CNEDiMTS

17 mai 2016

Faisant suite à l'examen du 17/05/2016, la CNEDiMTS a adopté le projet d'avis le 17/05/2016

CONCLUSIONS**PACIFICA LP**, pied à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe

Demandeur : FREEDOM INNOVATIONS Europe BV (Pays-Bas)

Fabricant : FREEDOM INNOVATIONS LLC (Etats-Unis)

Les modèles et références retenus sont ceux proposés par le demandeur (cf. page 3).

Indications retenues :	Celles de la LPPR : Compensation d'une incapacité à marcher résultant d'une déficience par amputation ou agénésie d'une partie ou de l'intégralité du membre inférieur, quelle qu'en soit l'étiologie (vasculaire, traumatique, tumorale, congénitale, ou autre). Ce type de pied prothétique est indiqué chez les patients ayant une amputation basse de jambe.
Service Rendu (SR) :	Suffisant, en raison de : - l'intérêt des pieds à restitution d'énergie en matière de capacités locomotrices. - l'intérêt de santé publique compte tenu du retentissement sur l'activité, la participation et la qualité de vie de la personne amputée du membre inférieur.
Comparateurs retenus :	Les autres pieds à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe.
Amélioration du SR :	Absence d'amélioration du Service Rendu (ASR de niveau V) par rapport aux autres pieds à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe.
Type d'inscription :	Nom de marque

Durée d'inscription :	5 ans
Données analysées :	Aucune donnée clinique spécifique à PACIFICA LP n'est disponible. Les données disponibles sont de nature technique. Elles démontrent la conformité du dispositif aux spécifications techniques actuelles. Conformément à l'avis de la commission du 9 juillet 2013, les notices comportant les informations techniques destinées aux prescripteurs et aux utilisateurs sont fournies.
Éléments conditionnant le SR :	
Spécifications techniques :	Le pied PACIFICA LP est conforme aux spécifications techniques de la LPPR pour les pieds à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe. Sont mises à disposition des prescripteurs les informations techniques qui leur sont utiles, à savoir : - les réglages, les combinaisons de butées, les configurations (choix de lames...) possibles en fonction du poids de l'utilisateur et/ou de son activité ; - la date de réalisation des essais d'évaluation technique et le nom du laboratoire qui a réalisé les essais ; - les résultats des essais : valeurs de la propulsion (nombre de points obtenus lors du relevé des caractéristiques force-déformation), de la déformation permanente à l'avant-pied et au talon, de l'inversion/éversion, de l'amplitude sagittale ; - la charge maximale autorisée définie par le fabricant. Elle devra néanmoins être présentée selon la norme NF EN ISO 10328 : 2006 relative aux essais portant sur la structure des prothèses de membres inférieurs. Ces informations sont également accessibles à l'utilisateur. Par ailleurs, après appareillage, l'industriel doit remettre à l'utilisateur un document d'information, rédigé en français et indiquant clairement les opérations d'entretien à réaliser (changement de pièces d'usure, graissage, vérification de la visserie) et la fréquence à laquelle doivent intervenir ces opérations. Les pieds à restitution d'énergie sont garantis pour une durée minimale de deux ans hors revêtement esthétique, et ce dans des conditions normales d'utilisation.
Modalités de prescription et d'utilisation :	Celles de la LPPR : La prescription doit être faite par un médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation (MPR) dans le cas d'une première prescription d'un pied à restitution d'énergie, ou lors du renouvellement avec changement du type de pied. Dans le cas du renouvellement du pied à restitution d'énergie à l'identique, la prescription n'est pas restreinte à ce spécialiste.
Conditions du renouvellement :	Un certificat de conformité aux spécifications techniques en vigueur lors de la demande de renouvellement d'inscription devra être fourni. Pour être reconnu valide par la CNEDiMTS, ce certificat devra dater de moins de 5 ans.
Population cible :	De l'ordre de 70 à 250 patients par an.

Avis 1 définitif

01 NATURE DE LA DEMANDE

Demande de renouvellement d'inscription sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale (LPPR dans la suite du document).

01.1. MODELES ET REFERENCES

Le pied PACIFICA LP est disponible avec une seule hauteur de talon de 10 mm et en 10 tailles : 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 et 31cm.

Le module de pied est identique pour les pieds gauche et droit ; seule l'enveloppe de pied varie selon le côté (côté gauche ou droit) et la couleur (3 teintes disponibles : claire, médium et foncée).

L'orthoprothésiste sélectionne le module de pied en fonction du poids et de l'activité du patient selon le tableau ci-dessous comprenant 9 catégories.

Identification du module selon l'activité et le poids du sujet

Niveau d'activité			Poids* (kg)
Modéré	Normal	Elevé	
1	1	2	44-52
1	2	3	53-59
2	3	4	60-68
3	4	5	69-77
4	5	6	78-88
5	6	7	89-100
6	7	8	101-116
7	8	9	117-130
8	9		131-147
9			148-166

*Le poids tient compte du poids du patient et de celui de sa prothèse et, le cas échéant, du poids des charges lourdes portées régulièrement par le patient dans le cadre de ses activités.

Les références du pied PACIFICA LP (module de pied + enveloppe esthétique) sont construites de la manière suivante :

FS4 – 00 – (T)(U)(VV)– (W) (X) –(Y)(Z), où

T correspond aux orteils (1 chiffre) : 0 pour standard et 1 pour séparés

U correspond au module (1 chiffre et la lettre A), allant de 1A à 9A selon le niveau d'activité du patient et son poids

VV correspond à la taille (2 chiffres), allant de 22 à 31 cm

W correspond à la forme : M pour standard et S pour orteils séparés

X correspond au côté (1 lettre) : R ou L indiquant respectivement une enveloppe droite ou gauche

Y correspond à la génération (1 chiffre) : 3 pour orteils standards et 2 pour orteils séparés

Z correspond à la teinte (1 lettre) : D pour foncée, M pour médium ou L pour claire

La liste de l'ensemble des références disponibles est fournie en annexe.

01.2. CONDITIONNEMENT

Le conditionnement unitaire comporte :

- une structure de pied carbone PACIFICA LP ;
- une enveloppe esthétique de pied ;
- une chaussette Spectra ;
- 2 coins talonniers ;
- 1 notice d'utilisation générale et une notice d'utilisation associée aux coins talonniers.

01.3. INDICATIONS REVENDIQUEES

Les indications revendiquées sont les indications de la LPPR pour les pieds à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe :

Compensation d'une incapacité à marcher résultant d'une déficience par amputation ou agénésie d'une partie ou de l'intégralité du membre inférieur, quelle qu'en soit l'étiologie (vasculaire, traumatique, tumorale, congénitale, ou autre).

Ce type de pied prothétique est indiqué chez les patients ayant une amputation basse de jambe.

01.4. COMPARATEURS REVENDIQUES

Les autres pieds à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe.

02 HISTORIQUE DU REMBOURSEMENT

PACIFICA LP est inscrit sous nom de marque sur la LPPR jusqu'au 1^{er} décembre 2015.

L'arrêté du 19 mars 2013¹ a maintenu l'inscription sous nom de marque des pieds à restitution d'énergie.

Les pieds à restitution d'énergie sont répartis en 4 classes. Les fabricants doivent soumettre leurs dispositifs à une évaluation technique dont les spécifications sont définies dans la LPPR. Cette expertise est réalisée par un laboratoire d'essais compétent et indépendant ; elle conduit à un score dont la valeur détermine la classe d'appartenance du produit.

03 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

03.1. MARQUAGE CE

Classe I, déclaration CE de conformité par le fabricant.

03.2. DESCRIPTION

Le pied PACIFICA LP est constitué de 3 éléments principaux :

- une lame et une semelle en matériau composite de fibres de carbone ;
- une enveloppe esthétique de pied, gauche ou droite, en polyuréthane, disponible en trois teintes (claire, médium et foncée).

Les tailles disponibles vont de 22 à 31 cm.

¹ Arrêté du 19 mars 2013 portant modification des modalités d'inscription des pieds à restitution d'énergie inscrits au chapitre 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPPR) du code de la sécurité sociale (JO du 29 mars 2013)
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027243099>

Le poids du pied PACIFICA LP en taille 27 cm (en incluant l'enveloppe de pied et la chaussette Spectra) est de 570 g.

La hauteur du talon prévue est de 10 mm.

La hauteur d'encombrement est de $59,16 \pm 0,13$ mm.

La jonction proximale est de type pyramide mâle.

Ce pied est destiné à des patients ayant une amputation basse de jambe et pesant jusqu'à 166 kg. Neuf catégories sont disponibles en fonction du poids et de l'activité du patient.

Le pied PACIFICA LP est garanti 36 mois et l'enveloppe esthétique est garantie 6 mois.

03.3. FONCTIONS ASSUREES

PACIFICA LP est un pied prothétique qui remplace anatomiquement le pied amputé du patient. Il restitue l'énergie emmagasinée lors de la phase d'appui de la marche.

03.4. PRESTATIONS

La prestation associée à la mise en place du pied à restitution d'énergie PACIFICA LP est réalisée par un orthoprothésiste.

Outre cette prestation initiale, le remplacement du revêtement esthétique (code 2721749) est inscrit sur la LPPR.

04 SERVICE RENDU

04.1. INTERET DU PRODUIT

04.1.1. ANALYSE DES DONNEES : EVALUATION DE L'EFFET DE COMPENSATION DU HANDICAP / EFFETS INDESIRABLES, RISQUES LIES A L'UTILISATION

04.1.1.1. RAPPEL DE L'AVIS PRECEDEMMENT EMIS PAR LA COMMISSION

Dans son avis du 12/07/2011² relatif à PACIFICA LP, la Commission s'est prononcée pour un service attendu suffisant, avec une ASA de niveau V par rapport aux autres pieds à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe inscrits sur la LPPR, sur la base de données techniques démontrant la conformité du dispositif PACIFICA LP aux spécifications techniques des pieds à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe du cahier des charges de la LPPR en vigueur en 2011.

Note : ce cahier des charges a été modifié par l'arrêté du 19 mars 2013¹ et celui du 30 janvier 2014³.

04.1.1.2. DONNEES SPECIFIQUES

Aucune étude clinique n'est fournie dans le dossier. Les données disponibles sont de nature technique. Elles démontrent la conformité du dispositif PACIFICA LP aux spécifications techniques des pieds à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe du cahier des charges en vigueur^{1,3}.

Conformément à l'avis de la Commission du 9 juillet 2013⁴, les notices comportant les informations techniques destinées aux prescripteurs et aux utilisateurs sont fournies.

² Avis de la CNEDiMTS du 12/07/2011 relatif au pied PACIFICA LP, pied à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe. HAS ; 2011. <http://www.has-sante.fr> (consulté le 03/05/2016)

³ Arrêté du 30 janvier 2014 portant modification des modalités d'inscription des pieds à restitution d'énergie inscrits au chapitre 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPPR) du code de la sécurité sociale (JO du 4/2/2014)

04.1.1.3. ÉVÉNEMENTS INDESIRABLES

Selon le demandeur, aucun événement indésirable concernant le pied à restitution d'énergie PACIFICA LP n'a été rapporté. Le nombre de pieds vendus depuis sa commercialisation en novembre 2002 n'est pas renseigné.

04.1.2. PLACE DANS LA STRATEGIE DE COMPENSATION DU HANDICAP

Les pieds prothétiques adaptables sur des prothèses d'amputation basse de jambe sont les pieds rigides (type SACH⁵) et les pieds articulés à axe simple ou multiaxial.

Pour chaque type de pied, plusieurs modèles existent pour répondre aux besoins des personnes amputées. Pour déterminer le pied adéquat, il faut tenir compte de la taille de la personne amputée, de son poids et des activités qu'elle pratique.

Le choix du type de pied peut évoluer dans le temps en fonction du projet de vie et des capacités de la personne amputée.

Ainsi, les pieds à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe peuvent être indiqués lors du premier appareillage ou en renouvellement d'appareillage. Lors de chaque renouvellement, les besoins de la personne doivent être réévalués pour déterminer la classe et les caractéristiques du pied y répondant le mieux.

04.1.3. CONCLUSION SUR L'INTERET DU PRODUIT

Au vu des données fournies, la Commission estime que le pied à restitution d'énergie PACIFICA LP a le même intérêt de compensation du handicap pour les personnes amputées du membre inférieur, que les autres pieds à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe dans l'indication suivante : Compensation d'une incapacité à marcher résultant d'une déficience par amputation ou agénésie d'une partie ou de l'intégralité du membre inférieur, quelle qu'en soit l'étiologie (vasculaire, traumatique, tumorale, congénitale, ou autre). Ce type de pied prothétique est indiqué chez les patients ayant une amputation basse de jambe.

04.2. INTERET DE SANTE PUBLIQUE

04.2.1. GRAVITE DE LA PATHOLOGIE

L'amputation du membre inférieur est à l'origine d'un handicap définitif et d'une dégradation marquée de la qualité de vie. L'appareillage prothétique est la seule alternative. Il doit permettre de restituer l'intégrité anatomique et de restaurer les fonctions de l'appareil locomoteur.

04.2.2. ÉPIDEMIOLOGIE DE LA PATHOLOGIE

Aucune donnée française récente relative à la prévalence des amputés du membre inférieur n'est disponible, hors diabète.

A titre indicatif, en 1990, l'incidence des amputés majeurs du membre inférieur est estimée à environ 8300 nouveaux cas / an et la prévalence à 90 000.

⁴ Avis de la CNEDIMTS du 09/07/2013 relatif aux pieds à restitution d'énergie. HAS ; 2013. <http://www.has-sante.fr>

⁵ SACH : Solid Ankle Cushion Heel ou Cheville rigide et talon coussiné

L'incidence est sensiblement la même actuellement (selon les données du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information - PMSI) : de l'ordre de 7800 à 7900 patients par an de 2010 à 2015.

ACTE		2010	2011	2012	2013	2014	2015
NZFA001	Désarticulations de la hanche	49	51	39	55	43	42
NZFA002	Amputation transtibiale	3608	3599	3632	3 767	3711	3743
NZFA003	Désarticulation genou	184	151	167	115	136	100
NZFA006	Désarticulation ou amputation du membre inférieur à travers l'os coxal, l'articulation sacro-iliaque ou le sacrum	21	23	23	25	15	11
NZFA007	Amputation transfémorale	4000	3971	3928	3 981	3918	3995
NZFA008	Désarticulation ou amputation interilioabdominale	9	8	7	6	6	9
Total		7871	7803	7796	7829	7949	7900

Données PMSI pour l'ensemble des établissements publics et privés.

Source ATIH (consulté le 2 mai 2016)

04.2.3. IMPACT

D'autres pieds à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe sont pris en charge par l'Assurance maladie.

04.2.4. CONCLUSION SUR L'INTERET DE SANTE PUBLIQUE

Le pied PACIFICA LP a un intérêt pour la santé publique compte tenu du handicap engendré par une amputation ou une agénésie de membre inférieur et de son impact sur la qualité de vie de la personne amputée du membre inférieur.

En conclusion, la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé estime que le service rendu de PACIFICA LP est suffisant pour l'inscription sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale dans l'indication retenue et les conditions de prise en charge actuelles des pieds à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe.

05 ÉLÉMENTS CONDITIONNANT LE SERVICE RENDU

05.1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES MINIMALES

Le pied PACIFICA LP est conforme aux spécifications techniques de la LPPR pour les pieds à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe.

Sont mises à disposition des prescripteurs les informations techniques qui leur sont utiles à savoir :

- les réglages, les combinaisons de butées, les configurations (choix de lames...) possibles en fonction du poids de l'utilisateur et/ou de son activité ;
- la date de réalisation des essais d'évaluation technique et le nom du laboratoire qui a réalisé les essais ;

- les résultats des essais : valeurs de la propulsion (nombre de points obtenus lors du relevé des caractéristiques force-déformation), de la déformation permanente à l'avant-pied et au talon, de l'inversion/éversion, de l'amplitude sagittale ;
- la charge maximale autorisée définie par le fabricant. Elle devra néanmoins être présentée selon la norme NF EN ISO 10328 : 2006 relative aux essais portant sur la structure des prothèses de membres inférieurs.

Ces informations sont également accessibles à l'utilisateur. Par ailleurs, après appareillage, l'industriel doit remettre à l'utilisateur un document d'information, rédigé en français et indiquant clairement les opérations d'entretien à réaliser (changement de pièces d'usure, graissage, vérification de la visserie) et la fréquence à laquelle doivent intervenir ces opérations.

Les pieds à restitution d'énergie sont garantis pour une durée minimale de deux ans hors revêtement esthétique, et ce dans des conditions normales d'utilisation.

05.2. MODALITES D'UTILISATION ET DE PRESCRIPTION

Celles de la LPPR :

La prescription doit être faite par un médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation (MPR) dans le cas d'une première prescription d'un pied à restitution d'énergie, ou lors du renouvellement avec changement du type de pied.

Dans le cas du renouvellement du pied à restitution d'énergie à l'identique, la prescription n'est pas restreinte à ce spécialiste.

06 AMELIORATION DU SERVICE RENDU

06.1. COMPARATEURS RETENUS

Les autres pieds à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe.

06.2. NIVEAU D'ASR

La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé s'est prononcée pour une absence d'amélioration du service rendu (ASR V) du pied PACIFICA LP par rapport aux autres pieds à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe.

07 CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT ET DUREE D'INSCRIPTION

07.1. CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT

Un certificat de conformité aux spécifications techniques en vigueur lors de la demande de renouvellement d'inscription devra être fourni. Pour être reconnu valide par la CNEDiMTS, ce certificat devra dater de moins de 5 ans.

07.2. DUREE D'INSCRIPTION PROPOSEE

5 ans

08 POPULATION CIBLE

Les patients susceptibles d'être appareillés avec un pied à restitution d'énergie (population cible) sont des personnes amputées ou ayant une agénésie d'une partie ou de l'intégralité du membre inférieur.

L'analyse de la littérature n'a pas permis d'identifier l'incidence des amputations et des agénésies. Les seules données disponibles permettant d'estimer la population cible proviennent des bases du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) dans les établissements publics et privés de court et moyen séjour (base de MCO Médecine Chirurgie Obstétrique pour les courts séjours et base de SSR Soins de Suite et de Réadaptation pour les moyens séjours).

Le nombre de séjours où une amputation du membre inférieur a été réalisée, était de 7 949 en 2014 (codes NZFA001, 2, 3, 6, 7, 8 de la CCAM V40 dans la base MCO).

D'après les données de la CNAMTS en 2014, 99,5% des pieds prothétiques, toutes classes confondues, sont attribués à des patients de moins de 90 ans. Une analyse de la base MCO en 2013 a montré que sur les 7015 patients concernés par une amputation du membre inférieur, 6 432 / 7 009 (92%) étaient âgés de moins de 90 ans. En considérant que les patients amputés susceptibles de bénéficier d'un pied à restitution d'énergie sont en majorité actifs, on peut estimer le nombre de patients amputés susceptibles d'être appareillés d'un pied prothétique au maximum à 6 400 par an.

Le nombre de séjours au cours desquels a été diagnostiquée une agénésie totale ou partielle du membre inférieur était de 905 séjours en 2014 (392 séjours en MCO et 513 séjours en SSR - Code CIM 10 Q72).

Au total, on peut estimer la population cible des patients amputés ou ayant une agénésie du membre inférieur, susceptibles d'être appareillés avec un pied à restitution d'énergie, au maximum à 7 000 par an, tous les patients amputés n'étant pas appareillés.

Jusqu'en 2012, une extrapolation de la population rejointe des pieds à restitution d'énergie était réalisée à partir des données de remboursement de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) de la Région Nord-Pas de Calais-Picardie, sachant que cette région représente environ 10% de la population française.

Nombre de pieds à restitution d'énergie pris en charge annuellement entre 2004 et 2012 dans la région Nord-Pas de Calais-Picardie selon la classe de pied (source : CNAMTS)

Pieds à restitution d'énergie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Classe I (VI8Z101)	43	56	68	78	49	59	64	51	66
dont renouvellement	-	-	53 (78%)	64 (82%)	37 (76%)	50 (85%)	57 (89%)	45 (88%)	56 (85%)
Classe II (VI8Z102)	138	175	133	152	137	208	212	187	217
dont renouvellement	-	-	105 (79%)	125 (82%)	119 (87%)	176 (85%)	164 (77%)	152 (81%)	179 (82%)
Classe III (VI8Z103)	130	181	108	111	114	216	224	229	269
dont renouvellement	-	-	98 (91%)	93 (84%)	88 (77%)	189 (88%)	184 (82%)	193 (84%)	233 (87%)
Amputation basse (VI8Z104)	7	13	4	6	6	13	21	28	13
dont renouvellement	-	-	3 (75%)	5 (83%)	6 (100%)	12 (92%)	18 (86%)	26 (93%)	12 (92%)

Depuis 2014, les données de la CNAMTS au niveau national sont disponibles. Le nombre de dispositifs remboursés par l'Assurance Maladie (après extrapolation à tous les régimes) était de 2 709 pieds en 2014 (classe I : 564, classe II : 1008, classe III : 1068, pied pour amputation basse de jambe : 69).

Ainsi, la population rejointe des patients appareillés avec un pied à restitution d'énergie en France serait de l'ordre de :

- pour la classe I : 500 à 1000 patients par an.
- pour la classe II : 1000 à 2200 patients par an.
- pour la classe III : 1000 à 3000 patients par an.
- pour amputation basse de jambe : 70 à 250 patients par an.

La CNEDiMTS estime que la population des patients susceptibles d'être appareillés avec un pied à restitution d'énergie pour amputation basse de jambe serait de l'ordre de 70 à 250 patients par an.

Annexe – Liste des références disponibles pour un pied prothétique PACIFICA LP complet (module de pied + enveloppe de pied)

FS4-00-01A22-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-02A22-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-03A22-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-04A22-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-05A22-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-06A22-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-01A23-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-02A23-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-03A23-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-04A23-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-05A23-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-06A23-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-01A24-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-02A24-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-03A24-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-04A24-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-05A24-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-06A24-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-01A25-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-02A25-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-03A25-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-04A25-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-05A25-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-06A25-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-01A26-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-02A26-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-03A26-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-04A26-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-05A26-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-06A26-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-01A27-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-02A27-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-03A27-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-04A27-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-05A27-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-06A27-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-01A28-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-02A28-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-03A28-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-04A28-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-05A28-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-06A28-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-01A29-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-02A29-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-03A29-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-04A29-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-05A29-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-06A29-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-01A30-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-02A30-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-03A30-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-04A30-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-05A30-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-06A30-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-01A31-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-02A31-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-03A31-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-04A31-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-05A31-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-06A31-M(côté)-3(teinte)

FS4-00-07A22-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-08A22-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-09A22-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-07A23-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-08A23-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-09A23-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-07A24-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-08A24-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-09A24-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-07A25-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-08A25-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-09A25-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-07A26-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-08A26-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-09A26-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-07A27-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-08A27-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-09A27-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-07A28-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-08A28-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-09A28-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-07A29-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-08A29-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-09A29-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-07A30-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-08A30-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-09A30-M(côté)-3(teinte)
FS4-00-07A31-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-08A31-M(côté)-3(teinte)	FS4-00-09A31-M(côté)-3(teinte)

